



Endovascular Grafting

Flex & Fitto

EGoist[®]

エゴイスト フレックス / フィット
インターベンショナルガイドワイヤ

Break through for Complex Anatomy
The Super Long Tapered Core Technology




MEDICO'S
Hirato

EGoist® Flex & Fitto


Interventional Guide Wire エゴイスト フレックス / フィット インターベンショナルガイドワイヤ

ステントグラフト用ガイドワイヤEGoist®に新たなラインナップが追加されました。
Super Long Tapered Coreの採用により、従来のサポートカに柔軟性と追従性をプラスした、しなやかさとスティッフ性を併せ持ったガイドワイヤです。

> 9mm Curve

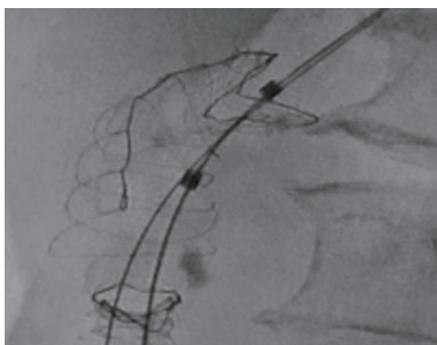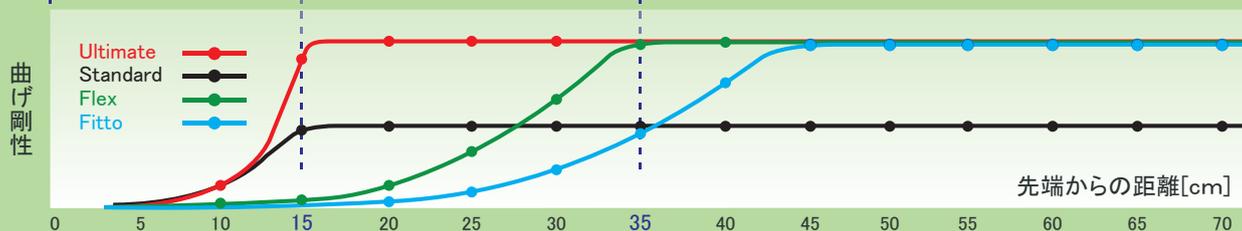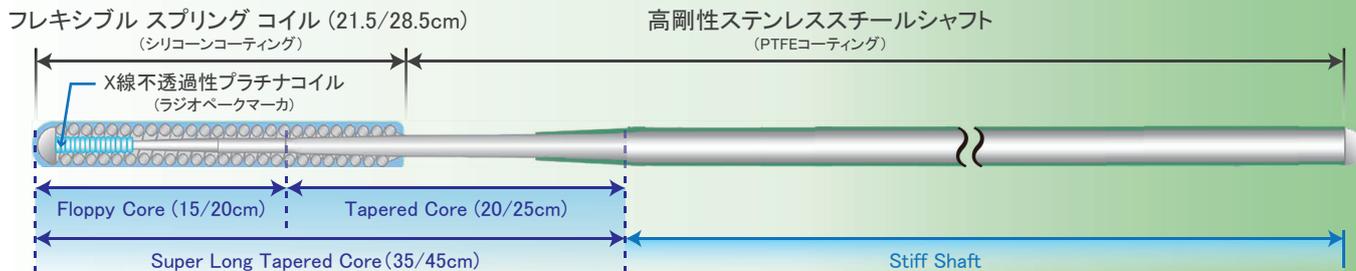

①サポート性の高いスティッフシャフト部までガイドワイヤを進め、バルーンカテーテルを挿入します。

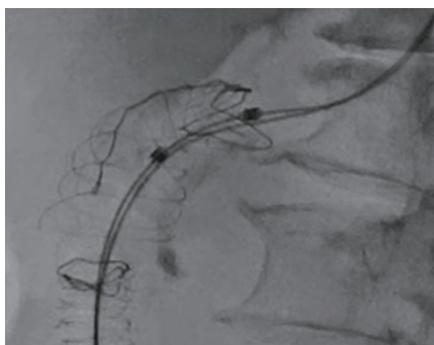

②柔軟なフレキシブルスプリングコイル部までガイドワイヤを引き下げ、バルーンカテーテルを屈曲した血管に沿わせてます。



③バルーンカテーテルを拡張し、ステントグラフトを屈曲に沿った状態で血管に圧着します。

ご協力: 阪口 昇二 先生 (松原徳洲会病院 大動脈ステントグラフト・血管内治療科)

タイプ	品番	外径 (inch)	先端形状	全長 (cm)	スプリングコイル長 (cm)	ラジオベークマーカ長 (cm)	JAN
Flex	EGX35-9C260R	.035	9mm Curve	260	21.5	4	4546364014711
Fitto	EGF35-9C260S	.035	9mm Curve	260	28.5	4	4546364014728



※EG(イージー:Endovascular Grafting) Projectは日本のニーズを反映したEVAR専用製品の開発、改良、販売及びシステム構築を目指すプロジェクトです

販売名: MH心臓・中心循環系用ガイドワイヤ
承認番号: 22500BZX00510000
クラス分類: クラスIV (高度管理医療機器)
包装単位: 1本
保険分類: 012 血管造影用ガイドワイヤ (2) 微細血管用

製造業者 **朝日インテック株式会社**

製造販売業者 **株式会社 メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

http://www.medicos-hirata.co.jp/