

Standardization,
automation,
versatility.



VARIXIO

VB DEVICES

VARIXIO

VARIXIO®マイクロフォームシステム



製造販売業者
株式会社 メディコ ス ヒラタ
本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288
<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

VBC002220225FB22(01)2202(01)/2000

VB DEVICES
Barcelona, Spain

MEDICO'S
Hirata

Hello capsule. Hello future.

VARIXIO®マイクロフォームシステムは、滅菌エアと硬化剤を自動で攪拌し、フォーム硬化剤を調製するシステムです。
このシステムにより、従来手動で行われていたフォーム硬化剤の調製を、自動化かつ標準化することが可能になります。

	製品名	品番	VARIXIO®Pod Air(カプセル)をセットして使用する電磁式スターラーです。いくつかのパラメータを選択すると、予めプログラムされた速度と時間で自動的に攪拌し、最適なフォーム硬化剤を調製します。
	VARIXIO® Pro Mag	VB04	
	製品名	品番	滅菌エア入りカプセルです。最大10mlのフォーム硬化剤を調製できます。密閉用シールとルアーロックキャップを備え、フォーム硬化剤を清潔に保ちます。 1箱10個入り、使用1回限りのディスプレイ製品です。
	VARIXIO® Pod Air	VB03	

販売名：VARIXIO マイクロフォームシステム
届出番号：27B1X00058000042


VARIXIO®マイクロフォームシステムは低濃度の硬化剤においても粒子が細かく均一で長持ちする高品質なマイクロフォーム硬化剤を自動で調製することが可能です。

Generation of high quality foam in under 45 seconds.



LOAD (注入)	AUTOMATIC STIRRING (自動攪拌)	WITHDRAW (取出し)
2mlの硬化剤をPod Airに注入します。	液晶モニターのガイドに沿って、いくつかのパラメータを選択すると、最適な速度と時間で自動的に攪拌を開始します。	45秒以内に調製が終了。直ぐにシリンジにて吸引し使用可能です。 低速での攪拌を続けることにより、15分間フォーム硬化剤を保存できます。

VARIXIO® represents A NEW GENERATION IN SCLEROTHERAPY

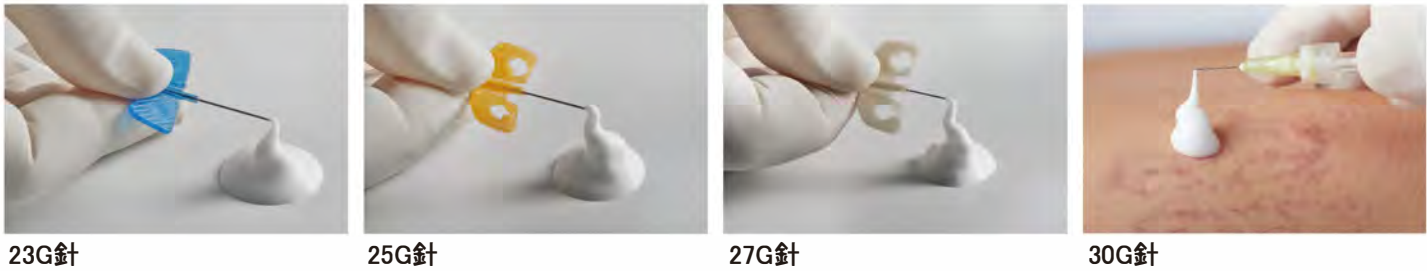

VARIXIO® フォームの特性		
バブル径	半減期	液状硬化剤とガスの混合比
80-120	1.5-2倍	1:5 to 1:7
microns	手動で調製したフォームとの比較	

Roche E., Pons R., Roche O., Puig A., A new automated system for the preparation of sclerosing foam: A study of the physical characteristics produced and the device settings required. Phlebology 0(0) 1-10.2020.